

1. ¿Qué es PuroFLOG Multidose y para qué se utiliza?

PuroFLOG Multidose es un producto sanitario que contiene Ectoín®, una molécula protectora de células naturales con propiedades reductoras de la inflamación y estabilizadoras de la membrana. PuroFLOG Multidose es una solución isotónica y se puede utilizar para tratar lesiones oculares y enfermedades inflamatorias de la córnea y la superficie ocular.

PuroFLOG Multidose hidrata los ojos secos, previene una mayor deshidratación y apoya el proceso de regeneración de la conjuntiva irritada y sensible.

PuroFLOG Multidose alivia los síntomas de los ojos irritados, como picazón, enrojecimiento, sequedad o ardor en los ojos, así como la sensación de cuerpo extraño. En 30 segundos se producirá una rápida reducción de síntomas como picazón, lagrimeo e irritación.

PuroFLOG Multidose es adecuado para todas las edades, usuarios de lentes de contacto y para ojos sensibles.

PuroFLOG Multidose no contiene conservantes.

2. Advertencias y precauciones

- PuroFLOG Multidose no debe usarse en caso de hipersensibilidad a la Ectoín® o a cualquiera de los otros componentes.
- Si se producen reacciones alérgicas debidas al producto, se debe suspender inmediatamente el uso de PuroFLOG Multidose.
- Por favor, no utilice productos dañados o perforados.
- Para garantizar una higiene segura, cada frasco de gotas para los ojos solo debe ser utilizado por una persona.
- No lo use durante más de 6 meses después de abrirlo.
- PuroFLOG Multidose debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

3. Lo que necesita saber antes de usar PuroFLOG Multidose

Existen datos clínicos disponibles para el uso seguro de PuroFLOG Multidose junto con antibióticos, antisépticos u otros tratamientos antiinflamatorios como protocolo estándar después de la cirugía.

4. Cómo usar PuroFLOG Multidose

Utilice siempre PuroFLOG Multidose de acuerdo con estas instrucciones de uso. Consulte a su médico o farmacéutico antes de usarlo si no está seguro.

Si su médico no le recetó lo contrario, aplique 1-2 gotas por ojo, varias veces al día. Si es necesario, PuroFLOG Multidose se puede utilizar varias veces por hora.

1. Antes de usar PuroFLOG Multidose por primera vez, retire el sello protector del frasco.
2. Se recomienda lavarse las manos antes de usar PuroFLOG Multidose.
3. Retire la tapa protectora del frasco y evite tocar la punta expuesta.
4. Incline la cabeza ligeramente hacia atrás.
5. Sostenga el frasco boca abajo con una mano entre el pulgar y el dedo índice. Sostenga el frasco lo más vertical posible.
6. Abra el ojo con cuidado usando el pulgar y el índice de la otra mano, o tire suavemente hacia abajo del párpado inferior para formar una bolsa o bolsillo y mire hacia arriba.
7. Coloque la punta del frasco cerca del párpado inferior, pero no deje que toque el ojo.
8. Libere una gota en la bolsa o bolsillo formado entre el ojo y el párpado apretando suavemente el frasco.
9. Cierre el ojo lentamente para dispersar la solución por todo el ojo lo mejor posible.
10. Repita el procedimiento en el otro ojo.
11. Vuelva a colocar con cuidado la tapa protectora después de cada uso de PuroFLOG Multidose.

5. Posibles efectos secundarios de PuroFLOG Multidose

PuroFLOG Multidose es bien tolerado. Hasta el momento, no se conocen efectos secundarios que ocurran regularmente o persistan.

En casos aislados, PuroFLOG Multidose puede provocar irritación ocular a corto plazo, hipermia ocular o conjuntivitis. Informe a su médico, farmacéutico o distribuidor del producto si nota efectos secundarios asociados con el uso de PuroFLOG Multidose.

Si las afecciones persisten o empeoran, comuníquese con su médico o farmacéutico.

6. Modo de almacenamiento PuroFLOG Multidose

La fecha de caducidad de PuroFLOG Multidose está impresa en la caja y en el frasco.

PuroFLOG Multidose no debe utilizarse después de que haya pasado la fecha de caducidad.

PuroFLOG Multidose debe almacenarse entre 2 °C y 25 °C.

7. Información adicional

Si se aplica PuroFLOG Multidose dentro de su uso previsto, no hay evidencia de un riesgo particular durante el embarazo o la lactancia.


El producto es apto para niños. Sin embargo, los niños menores de 10 años y los pacientes que no pueden usar PuroFLOG Multidose por sí solos, deben recibir asistencia durante la aplicación de PuroFLOG Multidose.

8. Contenido de PuroFLOG Multidose

Solución de 10 ml

Ingredientes: Ectoín®, cloruro de sodio, hidroxietilcelulosa, agua y tampón de citrato.

Fabricante legal:

 bitop AG
Stockumer Str. 28, 58453 Witten,
Germany



Distribuido en España por:

NTC OPHTHALMICS IBERICA S.L. - Calle Pinar, 5 - 28006 Madrid, España

Fecha de información: Marzo 2025

Explicación de los símbolos utilizados en el producto

	Marcado CE con número de organismo notificado		Por favor, no utilice materiales dañados o perforados
	Tenga en cuenta las instrucciones de uso		Fecha de caducidad
	Limitación de temperatura		Número de lote
	El producto es estéril por filtración aséptica		Fabricante legal
			Producto reciclable