


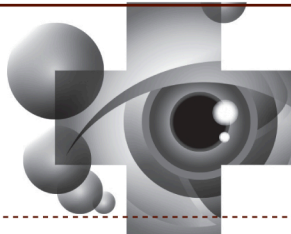

Puro EPITHEL

Dexpantenol 5%.
Gel oftálmico estéril, 10g.



Puro Epithel es un producto sanitario que ayuda a proteger y a mantener la hidratación de la superficie ocular al formar una capa protectora.

Características de Puro Epithel. Composición.

Un tubo de Puro Epithel contiene 10 g de gel oftálmico estéril.

1 g de Puro Epithel contiene 50 mg de dexpantenol, carbómero, edetato de disodio, sodio, hidróxido, agua y centrimida (conservante).

Uso recomendado de Puro Epithel.

Puro Epithel ayuda a mantener el balance fisiológico de la superficie ocular a través de la protección y la hidratación del epitelio corneal.

Alivio del ojo en casos de sequedad ocular provocada por agentes exógenos y de sensación de malestar, ardor y cansancio debidos al uso prolongado de ordenador, televisión o aire acondicionado.

Las propiedades físicas del carbómero permiten que **Puro Epithel** retenga agua y forme una capa lubricante y humectante en la superficie del ojo, lo que prolonga el tiempo promedio de ruptura de la película lagrimal en aquellas personas que padecen sequedad ocular y otras afecciones relacionadas con este síndrome.

Modo de uso de Puro Epithel:

- Lávese las manos adecuadamente antes de utilizar el producto.
- Inclíne la cabeza hacia atrás. Tire con delicadeza del párpado inferior hasta formar una pequeña cavidad entre el párpado y el ojo.
- Sostenga el tubo encima del ojo.
- Apriete ligeramente el tubo y aplique una gota en cada ojo.
- Al finalizar, cierre bien el tubo con el tapón.

Advertencias:

- No utilice el producto si tiene sensibilidad o alergia a alguno de sus componentes.
- Interrumpa el uso del producto si experimenta irritación ocular y póngase en contacto con su médico.
- No utilice el producto si el envase contenedor o la caja se encuentran dañados.
- No ingiera el producto.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el producto lejos de fuentes de calor, en lugar seco y a temperatura que oscile entre los 9°C y los 25°C.
- No ponga el extremo del tubo en contacto con el ojo o los dedos.
- Una vez abierto, utilícelo dentro de las 8 semanas posteriores.
- No utilice el producto después de la fecha de vencimiento detallada en la caja.
- Se recomienda no compartir Puro Epithel con otras personas.
- Después de su administración, podría experimentar una leve visión borrosa transitoria debido a la viscosidad del producto. Se recomienda que tenga precaución antes de realizar actividades que requieran nitidez visual.
- Qítense las lentes de contacto antes de aplicar el producto y espere 15 minutos antes de utilizarlas nuevamente.
- Aplicar Puro Epithel con las lentes de contacto puestas podría manchar la superficie de las lentes.
- En caso de administración simultánea de otros productos oftálmicos, deje pasar 15 minutos entre cada aplicación.
- En caso de embarazo o lactancia, consulte a su médico antes de utilizar el producto.
- Este producto no ha sido diseñado para utilizarse durante más de 30 días; si los síntomas persisten, consulte a su médico.

Fecha de revisión: 01.2019



STERILE A



9°C 25°C



athena.man
zana@ntc
pharma.com

Firmato digitalmente da
athena.manzana@ntcpharma.c
om
ND:
cn=athena.manzana@ntcphar
ma.com
Data: 2019.03.08 17:03:40
+01'00'



NTC S.R.L.
Via Luigi Razza, 3 - 20124 Milan, Italia

Distribuido por:
NTC OPHTHALMICS IBERICA, S.L.U.
CALLE PINAR, 5 - 28006 Madrid España



ophthalmics
Novelty. Technology. Care.