


Puro

CON 0,2% DE ÁCIDO HIALURÓNICO
HIDRATANTE Y LUBRICANTE

Sin conservantes
10ml envase

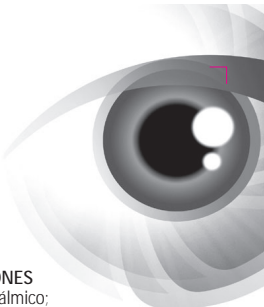

PURO es una solución estéril para uso oftálmico a pH fisiológico que contiene ácido hialurónico de grado farmacéutico (como hialuronato de sodio), un polímero que normalmente se encuentra en varias zonas del cuerpo humano. El ácido hialurónico tiene propiedades viscoelásticas, mucomiméticas y mucoadhesivas que mejoran la estabilidad de la película lagrimal y mantienen la superficie ocular lubricada e hidratada.

No contiene conservantes y/o moléculas con acción antiinflamatoria o vasoconstrictora.

PURO es compatible con lentes de contacto blandas y duras.

INDICACIONES DE USO

PURO hidrata y lubrica el ojo y por tanto le proporciona alivio en casos de irritación, sequedad y sensación de cuerpo extraño provocados por:

- síndrome del ojo seco;
- factores mecánicos (uso de lentes de contacto, después de una cirugía ocular);
- factores ambientales (viento, humo, polen, polvo, contaminación);
- estrés visual (exceso de luz, uso prolongado de ordenadores, portátiles, tabletas).

COMPOSICIÓN

Hialuronato de sodio 0,2%, ácido cítrico monohidrato, citrato de sodio trisódico dihidrato, cloruro de sodio, agua para preparaciones inyectables.

INSTRUCCIONES DE USO

- Lávese cuidadosamente las manos;
- Retire el precinto de garantía antes de la administración;
- Retire el tapón;
- Inclíne la cabeza y mire hacia arriba;
- Tire suavemente del párpado inferior del ojo hacia abajo para formar un pequeño saco entre el párpado y el ojo;
- Coja el frasco con la otra mano, dele la vuelta y aplique una presión moderada al frasco para instilar 1 gota de **PURO** dentro del saco creado;
- Si siente que no le entró ninguna gota en el ojo, instile otra gota;
- Repita el procedimiento para el otro ojo, si es necesario;
- Después de la instilación, cierre inmediatamente el frasco con el tapón, teniendo cuidado de agitar el frasco hacia abajo para eliminar cualquier exceso de producto antes de volver a colocar el tapón; no tocar otras superficies, incluyendo los ojos o los dedos, con la punta dosificadora;
- **PURO** puede usarse cuando sea necesario o siguiendo las indicaciones de su médico;
- El producto puede usarse dentro de los 3 meses posteriores a la primera apertura.

NTC Srl
Via L. Razza, 3

C.O.C. Farmaceutici S.r.l.
Via Modena, 15
40019 - Sant'Agata Bolognese
(BO) Italia



20124 Milano, Italia
Distribuido en España por
NTC OPTHALMICS IBERICA S.L.
Calle Pinar, 5
28006 Madrid España

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- El producto es solo para uso oftálmico;
- El producto es de uso personal, no debe compartirse su uso con otros pacientes;
- No utilice el producto si el precinto del tapón no está intacto cuando se usa por primera vez;
- No utilice el producto si hay partículas visibles y/o cambios en el color de la solución;
- No toque otras superficies, incluido el ojo, con la punta dosificadora;
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase y el frasco;
- En caso de efectos indeseables, suspenda el tratamiento y consulte a un médico;
- No utilizar en caso de incompatibilidad conocida con algún componente del producto;
- No se han notificado interacciones con medicamentos u otras gotas oftálmicas; en cualquier caso, deje que transcurran al menos 15 minutos antes de administrar cualquier otro colirio;
- El producto está destinado normalmente a un uso continuo durante no más de 30 días; si los síntomas persisten, consulte a su médico;
- Deseche el producto de acuerdo con las normativas locales de gestión de residuos;
- Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños;
- Para uso externo, no ingerir;
- No intente desenroscar o manipular el dosificador del frasco;
- **PURO** no está indicado para el tratamiento de infecciones y otras afecciones oculares. Tales condiciones requieren atención médica;
- Deberá notificar al fabricante y a la Autoridad Competente del Estado Miembro en el que esté establecido, cualquier incidente grave que se produzca con el producto.

EFFECTOS ADVERSOS

Tras la administración, puede producirse una visión ligeramente borrosa debido a la viscosidad de la solución, que desaparece rápidamente. Por tanto, es recomendable esperar unos segundos antes de realizar cualquier actividad que requiera una visión clara.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar entre 2 °C y 30 °C. El producto puede usarse dentro de los 3 meses posteriores a la primera apertura.

ENVASE

El envase consiste en un frasco multidosis que contiene 10 ml de solución estéril sin conservantes.

CADUCIDAD

Una vez abierto, no supere la fecha de caducidad indicada en el envase y en la etiqueta del frasco.



0051



DT/01/DT/006



Fecha de revisión:
02.01 del 10/2022

ntc ophthalmics
Novelty. Technology. Care